


Baylis
MEDICAL

 **VersaCross**
Solution transeptale RF

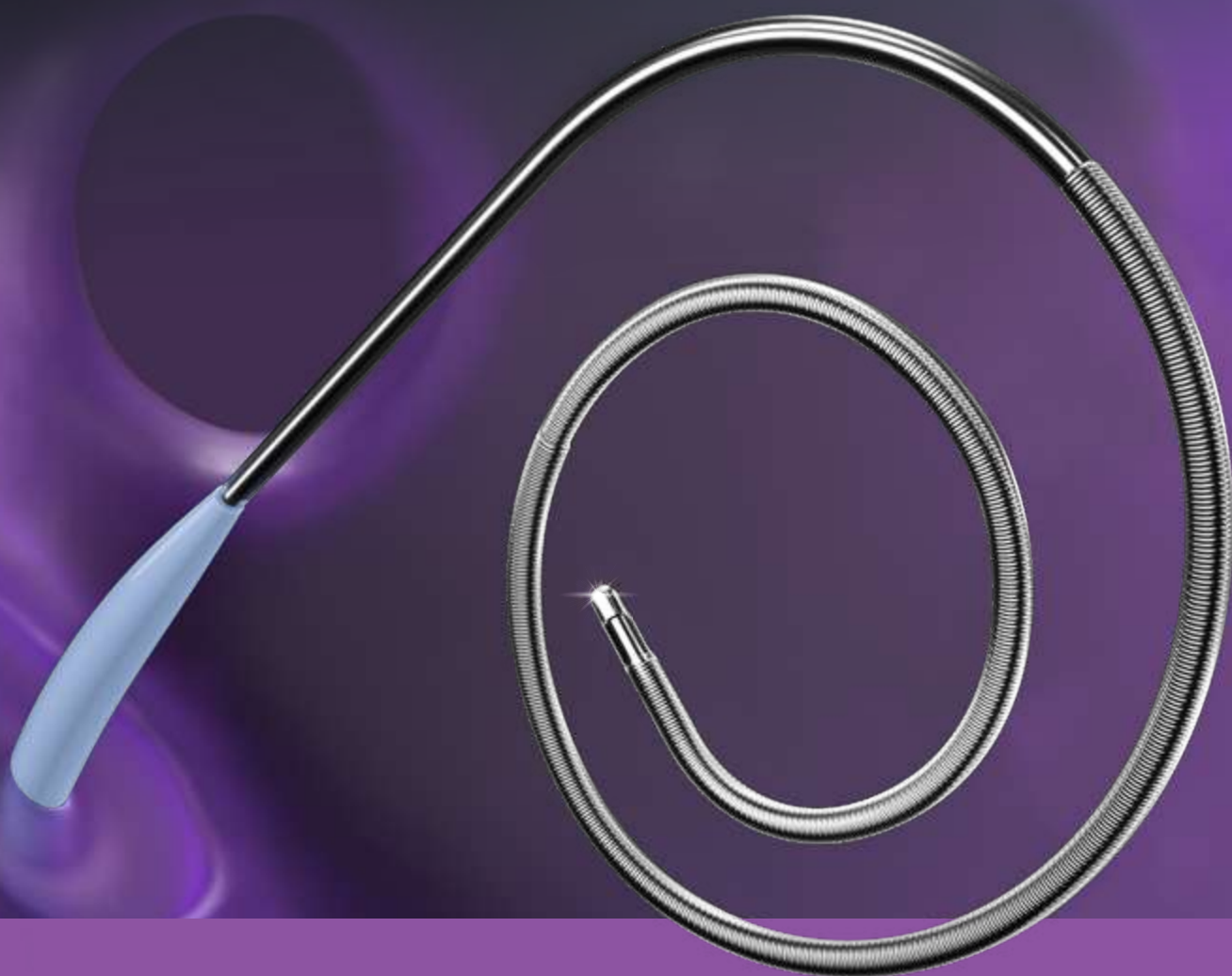


L'ACCÈS TRANSEPTAL REPENSÉ

Accélérez l'accès à l'insertion grâce à une seule solution

La seule solution **SANS ÉCHANGE***, de l'accès à l'insertion d'un dispositif de traitement de l'oreillette gauche

ÉLIMINE LES ÉCHANGES

Accédez à l'oreillette gauche au moyen d'une SEULE SOLUTION du début à la fin

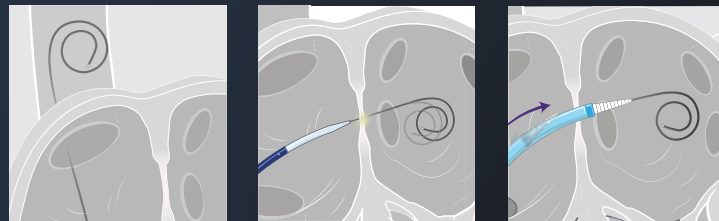

Procédez au repositionnement sur la fosse ovale par remontée dans la veine cave supérieure et redescente dans l'oreillette **SANS LE SOUCI** d'un échange d'aiguille

*Le fil RF VersaCross^{MD} peut être utilisé, sans échange, comme fil-guide, comme dispositif de ponction transeptale ou comme glissière d'échange pour l'insertion de gaines.

Une seule solution nécessaire pour
ACCÉLÉRER
votre traitement

Déroutement avec VersaCross^{MD}

Insérez le fil RF VersaCross^{MD} et la gaine VersaCross^{MD}

Retirez le système pour le repositionner

Positionnez sur la fosse

Vérifiez l'emplacement

Accès transeptal

Retirez le dilateur/gaine

Insérez le dispositif de traitement

Déroutement avec une aiguille mécanique

Insérez le fil-guide et la gaine

Retirez le fil-guide

Insérez l'aiguille

Retirez l'aiguille pour la repositionner

Retirez le système

Retirez l'aiguille

Insérez le fil d'échange

Sachez où vous êtes à tout moment grâce à la technologie **OMNIviz^{MC}**



RADIO-OPAQUE

Visualisez votre solution complète par fluoroscopie

Élimine les échanges



Accédez avec précision



Pratiquez une intervention sans effort




La seule solution **SANS ÉCHANGE***, de l'accès à l'insertion d'un dispositif de traitement de l'oreillette gauche

P O L Y V A L E N C E

ÉLIMINE LES ÉCHANGES

Accédez à l'oreillette gauche au moyen d'une SEULE SOLUTION du début à la fin

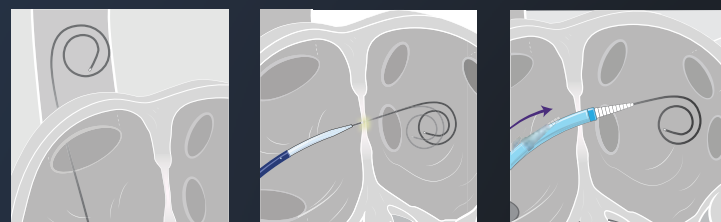

Procédez au repositionnement sur la fosse ovale par remontée dans la veine cave supérieure et redescende dans l'oreillette SANS LE SOUCI d'un échange d'aiguille

ACCÉDEZ AVEC PRÉCISION

TECHNOLOGIE PRÉCISE DE PONCTION RF pour optimiser l'emplacement de la ponction transeptale quelle que soit la structure anatomique



TECHNOLOGIE FAÇONNABLE

TRUform^{MC}

Dilatateur façonnable avec véritable maintien de la courbure



Fixation par pression pour s'assurer de l'alignement gaine-dilatateur

PRATIQUEZ UNE INTERVENTION SANS EFFORT

Obtenez instantanément l'accès et conservez-le SANS ÉCHANGES



Glissière robuste de 0,035 po pour l'insertion sûre de dispositifs de traitement

Embout flexible qui s'amortit contre la paroi de l'oreillette gauche et réduit le risque de perforation

*Le fil RF VersaCrossTM peut être utilisé, sans échange, comme fil-guide, comme dispositif de ponction transeptale ou comme glissière d'échange pour l'insertion de gaines.

Sachez où vous êtes à tout moment grâce à la technologie **OMNIVIZ**^{MC}




RADIO-OPAQUE

Visualisez votre solution complète par fluoroscopie



ÉCHOGÈNE

Repérez avec fiabilité vos dispositifs par échographie et soyez moins dépendant de la fluoroscopie

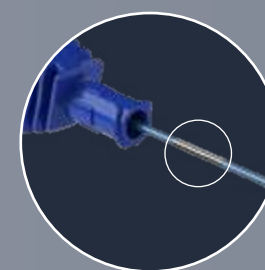

MARQUEURS POSITIONNELS

Confirmez visuellement la position de l'embout RF dans le dilatateur



MODÉLISATION

Suivez et marquez la position de l'embout RF sur votre système de cartographie

VersaCross

Baylis
MEDICAL

Solution transeptale RF **VersaCross**^{MD}

Plateforme complète d'outils pour personnaliser votre solution

PERSONNALISEZ VOTRE SOLUTION

1 Choisissez votre fil RF **VersaCross**^{MD}

Bout-J Spirale



Fil de ponction par RF **VersaCross**^{MD}

Longueur du fil RF : 180 cm, 230 cm

Diamètre externe du corps : 0,035 po

Diamètre de la courbe : 9 mm (bout-J),
24 mm (spirale)

2 Choisissez votre gaine **VersaCross**^{MD} pour compléter votre solution, offerte avec courbes du dilateur D1 ou D0 et technologie façonnable **TRUform**^{MC}



A Gaine transeptale **VersaCross**^{MD}

Taille compatible : 8,5F (2,84 mm)

Longueur utilisable de la gaine :
63 cm, 81 cm

Longueur utilisable du dilateur :
67 cm, 85 cm

B Gaine orientable **VersaCross**^{MD}

Courbes de la gaine : Petit (17 mm),
Moyen (22 mm), Grand (50 mm)


Angles de courbure : 90° en sens
antihoraire, 180° en sens horaire

Chaque trousse contient (dans des emballages individuels) :



(1) Fil RF et câble de connexion **VersaCross**^{MD}

(1) Gaine et dilateur **VersaCross**^{MD}

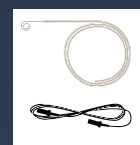

PRM-00519 FR J-1,2 V-2 © Tous droits réservés Baylis Médicale Cie, inc., 2022. Baylis Médicale Cie, Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications ou d'intégrer des modifications de conception sans préavis et sans encourir aucune obligation relative aux équipements fabriqués ou fournis antérieurement. VersaCross, TRUform, OMNiviz, le logo de VersaCross et le logo de Baylis Médicale sont des marques de commerce ou des marques déposées de Baylis Médicale Cie, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Brevets en instance et/ou accordés. ATTENTION : La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ces dispositifs à un médecin ou sur prescription médicale. Avant toute utilisation, consulter les étiquettes et feuillets des produits pour connaître les indications, les contre-indications, les risques, les avertissements, les mises en garde et les directives d'utilisation.

Les produits présentés ne sont peut-être pas approuvés dans toutes les juridictions.

Baylis

MEDICAL

Baylis Médicale Cie, inc.
5959, route transcanadienne
Montréal, QC Canada H4T 1A1

Tel. : (514) 488-9801 / Téléc. : (514) 488-7209
www.baylismedical.com / info@baylismedical.com